


# TRUMPOJI VARTOTOJO INSTRUKCIJA




TELTONIKA

## „TELTOHEART“ PALEIDIMAS

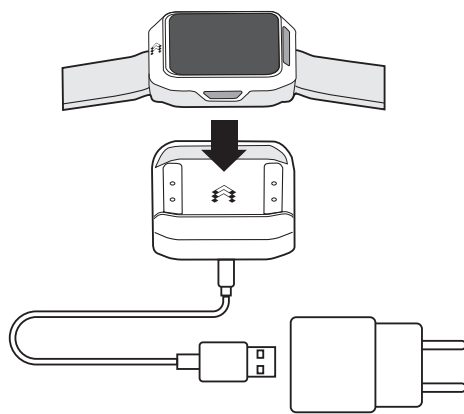


### 1) ĮKRAUKITE

- Įkiškite laidą į įkrovimo stotelę;
- Padėkite TeltoHeart ant įkrovimo stotelės;
- Įkiškite įkrovimo blokelį į elektros šaltinį.

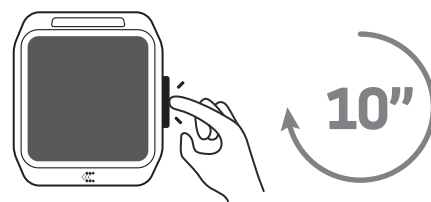

### 2) ĮJUNKITE

Įjunkite „TeltoHeart“ apyrankę, spausdami ir laikydami dešinėje esantį mygtuką 10 sekundžių.

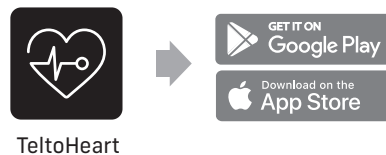


### 3) PARSISIŪSKITE PROGRAMĖLĘ

Apple Store (🍏) arba Google Play Store (📄) platformose paieškos laukelyje įveskite „TeltoHeart“ (📱) ir atsisiųskite programėlę į savo telefoną.

## Registracija

### 4) SUSIKURKITE PASKYRĄ

Atsisiųstoje į telefoną mobiliojoje programėlėje arba užėję į [teltocare.com](http://teltocare.com) paspauskite mygtuką „Registracija“ ir užpildykite registracijos formą.

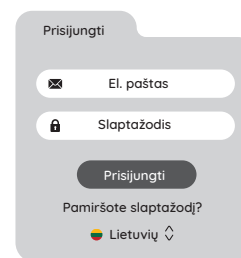

### 5) PRISIJUNKITE

Naudojant prisijungimo ID ir slaptažodį, telefone prisijunkite prie mobiliosios programėlės.



## Susieti įrenginį

### 6) SUSIEKITE

Įsitikinkite, kad Bluetooth funkcija telefone įjungta. „TeltoHeart“ mobiliojoje programėlėje eikite į „Susieti įrenginį“ skiltį ir paspauskite ant prietaiso pavadinimo, kuris atsiras sąrašė.




„TeltoHeart“ apyrankės ekrane matysite skaičius, kuriuos reikia suvesti telefono programėlėje iššokusiam lange.

TELTONIKA

Kilus klausimams kreipkitės:  
xxxx@teltonika.lt  
+370 XXX XXXXXX


## ELEKTROKARDIOGRAMOS GREITASIS ĮRAŠYMAS

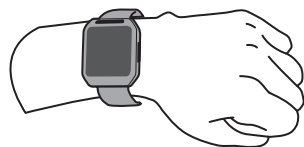


1) Atsisėskite ir įsitikinkite, kad „TeltoHeart“ yra ant kairiojo riešo ir tvirtai bei patogiai pritvirtintas.



2) „TeltoHeart“ ekranėlį perbraukite pirštu į viršų, kad atidarytumėte greitąjį meniu.

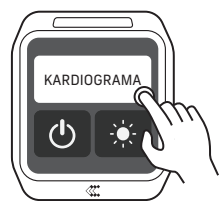

3) Ekrane paspauskite „KARDIOGRAMA“ mygtuką.

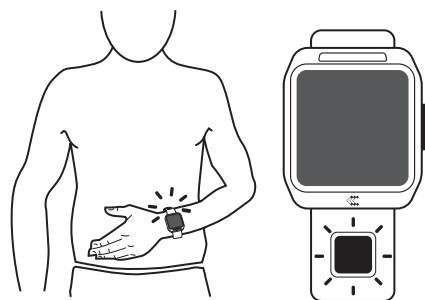


4) Pridėkite ant apyrankės esantį pilvo elektrodą prie pilvo kairės pusės apačios.



5) Laikydami pilvo elektrodą prie kairės pilvo pusės, uždėkite dešinės rankos pirštą ant piršto elektrodo, kuris yra virš ekrano.


Atsipalaiduokite ir stenkitės nejudėti, kai vyksta prieširdžių virpėjimo ir širdies ritmo įrašymas.

## GREITA DUOMENŲ PERŽIŪRA

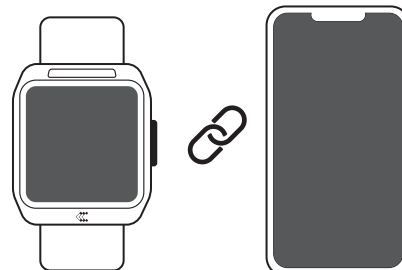

Įsitikinkite, kad „TeltoHeart“ programėlė yra įjungta, o „TeltoHeart“ apyrankė yra prisijungusi prie mobiliosios programėlės.


Programėlės pagrindiniame lange neturi būti jokių pranešimų, o „Susieti įrenginį“ skiltyje turi būti pranešimas „Prijungta“.

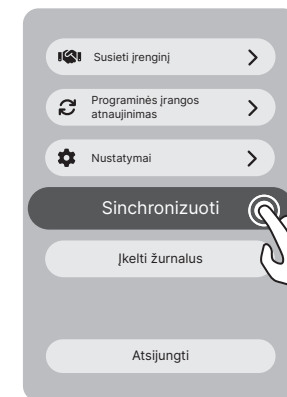

### DUOMENŲ IŠSIUNTIMAS

Programėlėje spauskite mygtuką „Sinchronizuoti“ arba užtikrinkite, kad mobilioji programėlė yra įjungta ir visada susijungusi su „TeltoHeart“ išmaniaja apyranke. Duomenys į [teltocare.com](http://teltocare.com) siunčiami iki 15 min.

teltocare.com

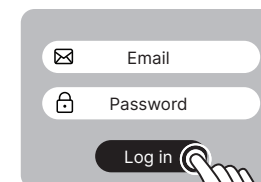

### DUOMENŲ PERŽIŪRA

„TeltoHeart“ apyrankės surinktus duomenis galite peržiūrėti adresu [teltocare.com](http://teltocare.com), naudodami tuos pačius prisijungimo duomenis, kaip ir prisijungiant prie „TeltoHeart“ mobiliosios programėlės.

Elektrokardiograma

Paspauskite ant „Elektrokardiograma“ sekcijos ir peržiūrėkite savo elektrokardiogramos įrašus.